

JETLAVAGE

Netzteil für Druckwundspülsystem/ AC Adapter mit Erdungsanschluss
Art. Nr. MST2500ADG-AC / Art. no MST2500ADG-AC

mst
medical service team

www.mst-gmbh.eu

Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung:




Eine umweltfreundliche Entscheidung. Die Netzteilösung bietet Ihnen die Möglichkeit vollständig auf Batterien zu verzichten und reduziert die Abfallmenge.

Spezifikationen:

- Wechselstrom Eingang 100 - 240 V 1. OA 50 - 60 Hz
- DC output 9V 30A

System Anzeigen und Anschlüsse:

- LED Anzeige für Netzbetrieb (Grünes LED).
- Anschluss für Jet Lavage Stromkabel.
- Anschluss für 220 V Wechselstromstecker.
- Erdungsanschluss (D)

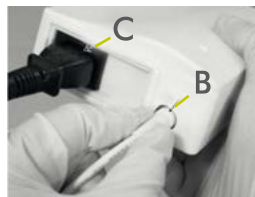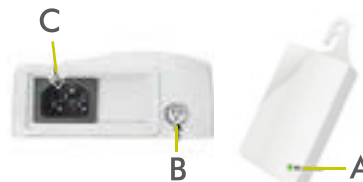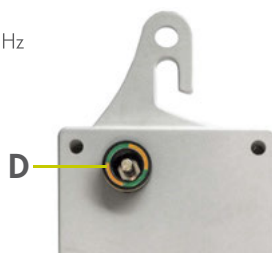

Anwendung:

1. Verbinden Sie das 220 V Stromkabel mit dem Netzteil (Anschluss C) und stecken Sie anschließend den Stecker an eine Stromquelle. Wenn eine Stromverbindung besteht leuchtet die LED Anzeige „grün“.
2. Verbinden Sie das Jet Lavage Stromkabel mit dem Netzteil. Anschluss (B) und vergewissern Sie sich, dass der Stecker sicher verbunden ist.
3. Hängen Sie das Netzteil an einem Infusionsständer oder legen Sie es an einen anderen geeigneten Platz.

Bitte beachten Sie:

Das Netzteil darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.

Manual

General Description:



An environment friendly option. The reusable AC Adapter system completely eliminates the need for alkaline batteries and to reduce the amount of waste.

Specification:

- AC Input 100 - 240 V 1. OA 50 - 60 Hz
- DC output 9V 30A

System displays and connectors:

- Power ON LED(Green)
- Power output socket (to Jetlavage system)
- AC input socket.
- Ground Connector (D)

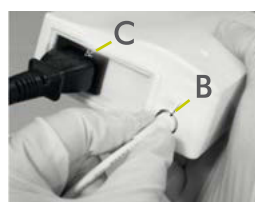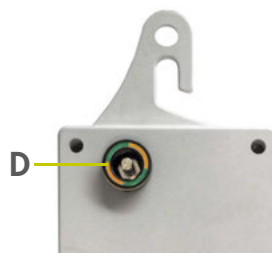

Instruction for use:

1. The power cord is plugged into AC input socket of AC adapter (A) and another end is plugged into wall outlet. The front cover LED will display green light means power „ON“ at this moment.
2. Connect Jet Lavage System power cord plug into AC adapter output socket (B) and ensure jack is securely attached.
3. Attach the AC adapter to an „I.V. stand“ or other convenient place.

Warnings:

The power supply must not come into contact with moisture.

jet lavage netzteil

Vertrieb durch: / Distributed by:

mst medical-service gmbh
eichkampredder 9
24217 schönberg

Telefon: +49 4344 818 36-20
Telefax: +49 4344 818 36-29
E-Mail: info@mst-gmbh.eu



Dongguan Kaiser Technology Co., Ltd.
No.81, Sanjiang Industrial District, Hengli
Town, Dongguan, Guangdong, China



EC REP

MedNet GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster
Germany

0197