

# FEMURBÜRSTE

zur Anwendung im chirurgischen und orthopädischen Bereich  
Art.-Nr. MSTBT04-PO

mst<sup>+</sup>  
medical service team

www.mst-gmbh.eu

## D Produktbeschreibung:

Die Femurbürste ist entwickelt worden, um Granulationsgewebe, Knorpel, Knochen und Zementfragmente zu entfernen. Somit ist eine saubere Oberfläche gewährleistet, um eine gute Fixation zwischen Knochen und Interface zu erzielen.

Die Femurbürste ist steril verpackt und wird in Boxen zu 10 Stück geliefert. (1VE=10 Stück)

## Spezifikationen:

- Steife Polyesterbürste zum Reinigen des Markkanals
- spiralförmig zur effizienten Entfernung von Gewebe und Fragmenten
- Kunststoffummantelung zur Schonung des umliegenden Gewebes und der Handschuhe
- Einmalartikel zur Senkung des Infektionsrisikos
- Manuell und maschinell einsetzbar

## Abmessungen:

<b>Gesamtlänge:</b>	280 mm
<b>Länge Bürstenkopf:</b>	110 mm
<b>Ø Bürstenkopf:</b>	20 mm
<b>Ø Handstück/Kunststoffummantelung:</b>	8 mm
<b>Ø Anschluss maschinell/manuell:</b>	6,5 mm

## Anwendung:

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Femurbürste.
2. Die Femurbürste kann in das Jakobsfutter eines Handgriffes wie auch in allen anderen chirurgischen Maschinen eingespannt und verwendet werden.
3. Nach Gebrauch bitte sachgerecht entsorgen.

## Bitte beachten Sie:

















Dieser Artikel darf nur von einem Arzt angewendet werden.

## Warnung:

- Bitte benutzen Sie keinen Artikel, der bereits geöffnet oder dessen Verpackung beschädigt ist.
- Der Artikel darf nicht wieder aufbereitet werden.




### Labeling Symbols

	Refer to instruction manual/booklet
	General warning sign / Caution
	Do not use if package is damaged
	Do not re-use
	Keep dry
	Storage temperature range
	Sterilized using ethylene oxide
	Catalog number
	Batch code
	Complies with EU directives
	Manufacturer
	Authorized Representative in the European Community
	Use by date
	Not made with latex
	Premature unpacking warning
	Medical Device

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Artikel müssen direkt vom Anwender dem Hersteller, sowie der zuständigen Behörde seines Mitgliedstaates gemeldet werden!

Vertrieb durch:  
mst medical-service gmbh  
eichkampredder 9  
24217 schönberg

Telefon: +49 4344 818 36-20  
Telefax: +49 4344 818 36-29  
E-Mail: info@mst-gmbh.eu

 Dongguan Kaiser Technology Co., LTD.  
No. 6, 2nd Road, Sanjiang Industrial Block,  
Hengli Town, Dongguan City,  
523462 Guangdong, P.R. China

EC REP

MedNet EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10, 48163 Muenster  
Germany