

KOAXIALER KANALBÜRSTENAUFSATZ

Zubehör MST-Jetlavage
Art.-Nr. MSTBT04-Z

mst
medical service team

www.mst-gmbh.eu

D Produktbeschreibung:

Die Koaxialbürste ist als Zubehör zur MST-JetLavage (MST2500Z-BB, MST2500Z-AC und MST2500Z-ACB) entwickelt worden, um während der Hüftendoprothetik den Markkanal zu reinigen.

Einmalartikel zur Senkung des Infektionsrisikos.

Die Femurbürste ist steril verpackt und wird in Boxen zu 10 Stück geliefert (1 VE=10 Stück).

Spezifikationen:

Gesamtlänge:	310 mm
Länge Bürstenkopf/ PVC (Polyvinylchlorid):	76 mm
∅ Bürstenkopf/ PVC (Polyvinylchlorid):	16 mm
Bürstenansatzstück/ PC (Polycarbonat)	

Anwendung:

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Koaxialbürste.
2. Setzen Sie das Ende des Bürstenansatzes auf das JetLavage Handstück bis es sicher eingerastet ist.
3. Nach Gebrauch bitte sachgerecht entsorgen.

Entsorgung:

Der Artikel ist nach allen gängigen nationalen und internationalen Entsorgungsrichtlinien zu entsorgen.



Bitte beachten Sie:

- Dieser Artikel darf nur von einem Arzt angewendet werden.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Methode und nicht für andere Zwecke!
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen!

Warnung:

- Bitte benutzen Sie keinen Artikel, der bereits geöffnet oder dessen Verpackung beschädigt ist.
- Der Artikel darf nicht wieder aufbereitet werden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
Nichtbeachtung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

Labeling Symbols

- General warning sign / Caution
- Do not use if package is damaged
- Do not re-use
- Keep dry
- Storage temperature range
- Sterilized using ethylene oxide
- Complies with EU directives
- Not made with latex
- Manufacturer
- Authorized Representative in the European Community
- Use by date
- Date of manufacture
- Consult instructions for use
- Medical Device
- Catalog number
- Batch code

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Artikel müssen direkt vom Anwender dem Hersteller, sowie der zuständigen Behörde seines Mitgliedstaates gemeldet werden!

Vertrieb durch:
mst medical-service gmbh
eichkampredder 9
24217 schönberg

Telefon: +49 4344 818 36-20
Telefax: +49 4344 818 36-29
E-Mail: info@mst-gmbh.eu

Dongguan Kaiser Technology Co., LTD.
No. 6, 2nd Road, Sanjiang Industrial Block,
Hengli Town, Dongguan City,
523462 Guangdong, P.R. China

EC REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster
Germany