

JETLAVAGE

Druckwundspülsystem, Verwendung mit Netzteil
Inkl. Saug- und Spülaufsatz für die Knie- und Hüftchirurgie
Art. Nr. MST2500Z-ACB/Blisterverpackung

mst
medical service team

www.mst-gmbh.eu

Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung:

Die Jetlavage ist ein komplettes Einwegspülsystem, entwickelt für den Einsatz bei orthopädischen und traumatologischen Operationen und für die Wundreinigung. Das System enthält:


- 1 Handstück
- 1 Kurzer Spülaufsatz MSTST01-Z
- 1 Langer Spülaufsatz MSTCT02-Z

Spezifikationen:

- DC 9V über AC Adapter Art. Nr. MST2500N-AC
- Schlauchlänge für Spülu- und ablauf 3m
- High speed Durchflussrate über 1200ml/min
- Low speed Durchflussrate 500ml/min
- Spüldruck 1 Bar

Anwendung:

1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie alle Teile.
2. Drücken Sie den Sicherungsclip (A) nach oben. Wählen Sie den kurzen Spülaufsatz für Knie / Wunde oder den langen Spülaufsatz für die Hüfte aus und verbinden diesen mit dem Handstück. Sichern Sie den ausgewählten Spülaufsatz am Handstück in dem Sie den Sicherungsclip (A) wieder nach unten drücken. Achten Sie darauf dass der Sicherungsclip richtig einrastet. (Achtung: Wenn Sie den langen Aufsatz für die Hüfte auswählen, müssen Sie die Schutzkappe am Ende vor der Benutzung entfernen)
3. Reichen Sie das Ende des Kabelende für das Netzteil an den Springer. Das Kabel mit dem Netzteil (AC Adapter F) verbinden.
4. Reichen Sie den Zulaufschlauch (D) dem Springer und verbinden diesen mit dem Flüssigkeitsbeutel.
5. Reichen Sie den Ablaufschlauch (C) dem Springer und verbinden diesen mit dem Sauger.
6. Entfernen Sie den Sicherungsclip am Schalter (E). Der Schalter hat 2 Stufen. Nach oben gedrückt spülen Sie mit High Speed, nach unten gedrückt mit Low Speed. In der Mittelposition ist die Pumpe ausgeschaltet. Der Absaugschlauch hat einen Clip zum Reduzieren der Absaugmenge.
7. Nach Beendigung des Spülvorgangs entfernen Sie alle Schlauchverbindungen und entsorgen das Produkt sachgerecht.

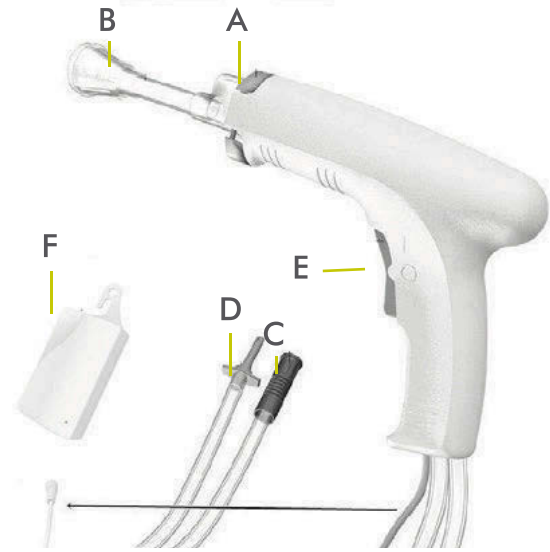

Bitte beachten Sie:

Dieses System darf nur von einem Arzt angewendet werden.

Warnung:

- Benutzen Sie keine Systeme, die bereits geöffnet sind oder bei denen die Verpackung beschädigt ist.
- Die Batterien müssen separat entsorgt werden.
- Lagern Sie das System kühl und trocken.
- Das System darf nicht wieder aufbereitet werden.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Nichtbeachtung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.


Labeling Symbols

- Refer to instruction manual/booklet
- General warning sign / Caution
- Do not use if package is damaged
- Do not re-use
- Keep dry
- Storage temperature range
- Sterilized using ethylene oxide
- Catalog number
- Batch code
- Serial number
- Complies with EU directives
- Manufacturer
- Authorized Representative in the European Community
- Direct current
- Use by date
- Solid particle protection: > 12.5mm
- Not made with latex
- Premature unpacking warning
- Medical Device
- BF type

MSTCT02-Z Langer Spülaufsatz



MSTST01-Z Kurzer Spülaufsatz

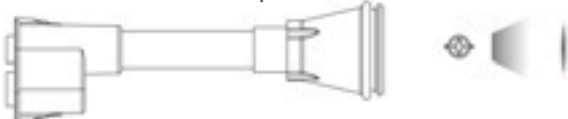

Optional: MSTBT04-Z - Femur Kanalbürste



Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Artikel müssen direkt vom Anwender dem Hersteller, sowie der zuständigen Behörde seines Mitgliedstaates gemeldet werden!

Vertrieb durch:
mst medical-service gmbh
eichkampredder 9
24217 schönberg

Telefon: +49 4344 818 36-20
Telefax: +49 4344 818 36-29
E-Mail: info@mst-gmbh.eu

Dongguan Kaiser Technology Co., LTD.
No. 6, 2nd Road, Sanjiang Industrial Block,
Hengli Town, Dongguan City,
523462 Guangdong, P.R. China

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster
Germany