

SAUGER mit Filter und Schlauch

Art.-Nr. MST-HA400

mst
medical service team

www.mst-gmbh.eu

Produktbeschreibung

Dieser Sauger mit integriertem Filter dient zum Entfernen von Flüssigkeiten, um die Sichtbarkeit im Operationsfeld zu verbessern. Er verfügt über eine Sammelkammer mit Filter, die Verunreinigungen und Blutgerinnsel auffängt. Intraoperativ kann die Sammelkammer durch leichtes Entfernen des Filters entleert und gereinigt werden.

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Nichtbeachtung kann zu Schäden oder Verletzungen führen.

Indikation

Chirurgisches Operieren

Kontraindikation

Keine bekannt

Bitte beachten Sie

- Der Artikel ist nur steril bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung!
- Nur zur EINMALIGEN Anwendung – NICHT erneut sterilisieren!
- Ein beschädigter Artikel darf nicht verwendet werden!



Warnung

- Bitte Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebener Methode und nicht für andere Zwecke!
- Lassen Sie den Artikel nicht fallen!
- Lagern Sie den Artikel kühl und trocken!


Haltbarkeit/Sterilität

- Bitte lesen Sie und prüfen Sie das Etikett.

Entsorgung

- Der Artikel ist nach allen gängigen nationalen und internationalen Entsorgungsrichtlinien zu entsorgen.

Bedienungsanleitung

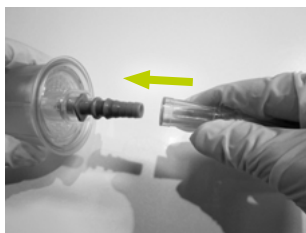

Anschluss des Saugschlauches

„A“ Anschluss am Sauger für die Verbindung am Saugschlauch „B“ Verbindungsende „C“ des Saugschlauches zum Anschluss an das Saugsystem.




Entfernung der Saugkammer

Drücken Sie die Saugkammer zusammen und ziehen Sie bei Bedarf die Filterkappe zur Reinigung heraus. Danach die Filterkappe wieder einschnappen lassen.

Alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Artikel müssen direkt vom Anwender dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde seines Mitgliedstaates gemeldet werden!


Vertrieb durch:
mst medical-service gmbh
eichkampredder 9
24217 schönberg

Telefon: +49 4344 818 36-20
Telefax: +49 4344 818 36-29
E-Mail: info@mst-gmbh.eu







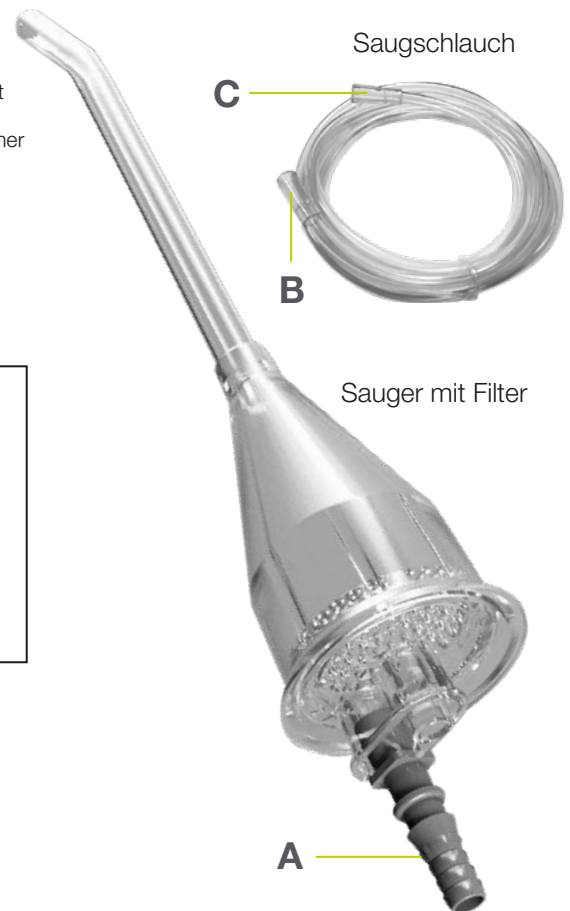


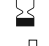





 Dongguan Kaiser Technology Co., LTD.
No. 6, 2nd Road, Sanjiang Industrial Block,
Hengli Town, Dongguan City,
523462 Guangdong, P.R. China

EC REP

MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster
Germany



Labeling Symbols

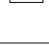-  General warning sign / Caution
-  Do not use if package is damaged
-  Do not re-use
-  Keep dry
-  Storage temperature range
-  Sterilized using ethylene oxide
-  Complies with EU directives
-  Manufacturer
-  Authorized Representative in the European Community
-  Use by date
-  Date of manufacture
-  Consult instructions for use
-  Medical Device
-  Catalog number
-  Batch code